


Uw handleiding voor de interpretatie van **Catalyst® Progesterone**

Bepaal het optimale dektijdstip bij honden met betrouwbare en kwantitatieve waarden.

Het moment van ovulatie en het optimale dektijdstip kunnen het beste worden vastgesteld door een duidelijke toename in de progesteronconcentratie te meten aan de hand van meerdere bepalingen.

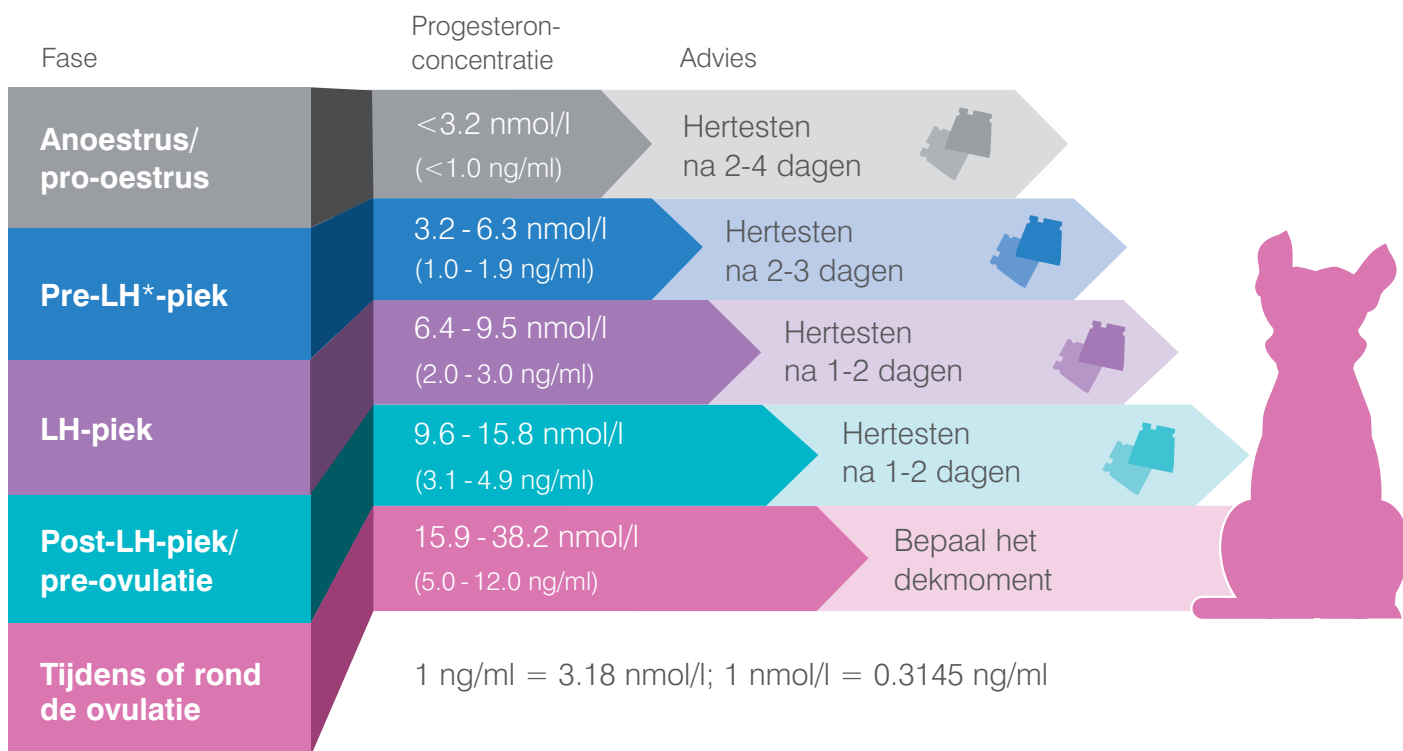

Bepaal een uitgangswaarde van progesteron

en vaginale cytologie bij de eerste tekenen van loopsheid.

Verhoog de frequentie van progesteronbepalingen

wanneer bij vaginale cytologie 75% superficiële cellen worden aangetroffen (doorgaans 3-4 dagen nadat bloederige uitvloeiing is waargenomen).

Bevestig een aanhoudende stijging boven 15.9 nmol/l (5.0 ng/ml) om het moment van ovulatie in te schatten.

Geef een dekadvis op basis van natuurlijke dekking, of op basis van kunstmatige inseminatie en het type sperma.

Belangrijke opmerking: Het bovenstaande zijn richtlijnen. Individuele honden kunnen daarvan afwijken. Progesteron kan het best worden gebruikt in combinatie met andere methoden voor fertiliteitsbegeleiding, waaronder klinische symptomen, vaginale cytologie, vaginoscopie, echografie en aanvullende hormoonbepalingen.